



Suma Med Neutral NC

Neutraliseringsmiddel til laboratorieudstyr

Beskrivelse

Suma Med neutral NC er et surt specialmiddel til neutralisering af alkaliske rester på kirurgiske instrumenter og varmebestandigt udstyr i forbindelse med intensiv behandling og narkose.

Egenskaber

Suma Med Neutral NC doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsanlæg eller tilsvarende udstyr i slutskyllevandet på ultralydsmaskiner og instrumentvaskemaskiner

Indeholder en svag organisk syre, som gør det særlig velegnet til anvendelse på vævsdyrkningsflasker, laboratorie-glasudstyr, infusionsflasker og sutteflasker.

Fordele

- Efterlader overflader rene og uden produktrester
- Effektiv til neutralisering af alkaliske rester efter maskinopvaskemidlet
- Fjerner kalkopbygninger

Brugsanvisning

Suma Med Neutral NC doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsanlæg eller tilsvarende udstyr i slutskyllevandet på ultralydsmaskiner og instrumentvaskemaskiner i en koncentration på 0,2 g/ltr. vand.

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): 1.5
Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): 1.17

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
101106731	Suma Med Neutral NC 2x5L W4304	Automatisk dosering

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 13/01/2023 da-DK (K02016)

