

Suma Med Enzyme

Svagt alkalisk, enzymbaseret, flydende specialmiddel til blødt som mellemhårdt vand

Beskrivelse

Suma Med Enzyme er et svagt alkalisk, flydende specialmiddel, baseret på enzymer. Den specielle formulering giver fremragende resultater til fjernelse af besmudsning på kirurgiske instrumenter i blødt som mellemhårdt vand.

Egenskaber

- Svagt alkalisk, flydende specialmiddel
- Anvendes i en lang række instrumentvaskemaskiner samt almindelige opvaskemaskiner
- Specielt formuleret til fjernelse af besmudsning på kirurgiske instrumenter, narkose- og endoscoopudstyr i instrumentvaskemaskiner og almindelige opvaskemaskiner
- Indeholder proteinnedbrydende enzymer
- Fjerne besmudsning i blødt som mellemhårdt vand

Fordele

- Effektivt over for besmudsning og indtørret blod
- Den koncentrerede formulering giver fremragende brugsøkonomi
- Enzymatisk rengøring er skånsom ved instrumenter, som er særlige pH-følsomme
- Brugervenlig emballage gør dunkskift nemt

Brugsanvisning

Dosering

Suma Med Enzyme doseres normalt gennem Diversey's automatiske doseringsudstyr eller tilsvarende udstyr i en koncentration på min. 1 g/ltr. vand. Det anbefales, at produktet doseres ind i maskinen startende ved en temperatur på 20-25 °C med en vasketid på 5-10 min. Enzymerne i **Suma Med Enzyme** er vaskeaktive op til 55-60 °C.

Anvendelse

Isæt sugelansen i dunken og doseringsudstyret vil styre den korrekte dosering. Produktet kan ligeledes anvendes manuelt. Under arbejdet skal der anvendes handsker (PVC, nitril, latex eller neopren). Den aktuelle doseringsforskrift er afhængig af lokale vandforhold.


Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, farveløs væske
pH-værdi (1% opløsning)	7-9
Vægtfylde (20 °C)	1.15 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af propylenglykol (fedtfjerner), citrat (kalkbinder), gluconat (kalkbinder), enzym (proteinopløsende) og calciumchlorid (hjelpestof) og konserveringsmiddel.

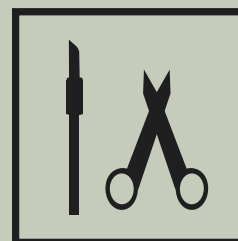

Suma Med Enzyme

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 35 °C.

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Med Enzyme** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et hospital.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7511762	2x5 ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.com

P01150DKDK-09

© Copyright 2012 Diversey