



Suma Med neutral

Neutraliseringsmiddel

Beskrivelse

Suma Med neutral er et surt specialmiddel til neutralisering af alkaliske rester på kirurgiske instrumenter og varmebestandigt udstyr i forbindelse med intensiv behandling og narkose.

Egenskaber

- Surt specialmiddel til neutralisering af alkaliske rester på kirurgiske instrumenter og varmebestandigt udstyr i forbindelse med intensiv behandling og narkose
- Doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsanlæg eller tilsvarende udstyr i slutskyllevandet på ultralydsmaskiner og instrumentvaskemaskiner
- Indeholder en svag organisk syre, som gør det særlig velegnet til anvendelse på vævsdyrkningsflasker, laboratorie-glasudstyr, infusionsflasker og sutteflasker

Fordele

- Rene og neutraliserede overflader
- Effektiv til neutralisering af alkaliske rester efter maskinopvaskemidlet
- Fjerner kalkopbygninger

Brugsanvisning

Dosering

Suma Med neutral doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsanlæg eller tilsvarende udstyr i slutskyllevandet på ultralydsmaskiner og instrumentvaskemaskiner i en koncentration på 0,2 g/ltr. vand. Doseringsforskriften er afhængig af de lokale vandforhold.


Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, ufarvet væske
pH-værdi i koncentrat	≤ 2.0
Vægtfylde (20° C)	1.17 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af citronsyre (neutraliserer alkalirester, kalkbinder).

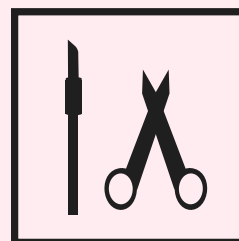

Suma Med neutral

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Med neutral** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i hospitalslaboratorier og på kirurgiske instrumenter.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100930821	5 lt	Dunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk