

Chlorine Disinfection

Engangsmop med aktivt klor



**Bredspektrt
Sporedræbende
Altid korrekt dosering**

Wet Wipe Chlorine Disinfection engangsmopper imprægneret med klor i pulverform

Pakken med 3 mopper indeholder en crackingpose med væske. Når posen er brudt, løber væsken ud i mopperne, som er klar til brug efter 10 min. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection opnår du en optimal og enkel desinfektion.

Anvendelsesområder

Desinfektion af gulve f.eks. ved patienter i isolation. Desinficerer effektivt mod Norovirus og f.eks. HIV og Hepatitis B, vegetative bakterier, skimmel- og gærsvampe og opfylder kravet til desinfektionsopgaver ved udbrud af Clostridium difficile.

Brugsanvisning

1. Påsæt sålen på fremføreren
2. Læg engangsmoppen på gulvet
3. Tryk sålen på engangsmoppen
4. Påbegynd desinfektion af gulvet
5. Engangsmoppen og sålen kasseres efter brug og fremfører og teleskopskaft desinficeres

Bemærk

Engangsmopperne bevarer deres desinfektionseffekt på >1000 ppm aktivt klor i 7 dage efter åbning.


Varenr. 60172:

1 pakke indeholder 3 mopper, 45×13 cm

Indhold

Aktivt klor >1000 ppm

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

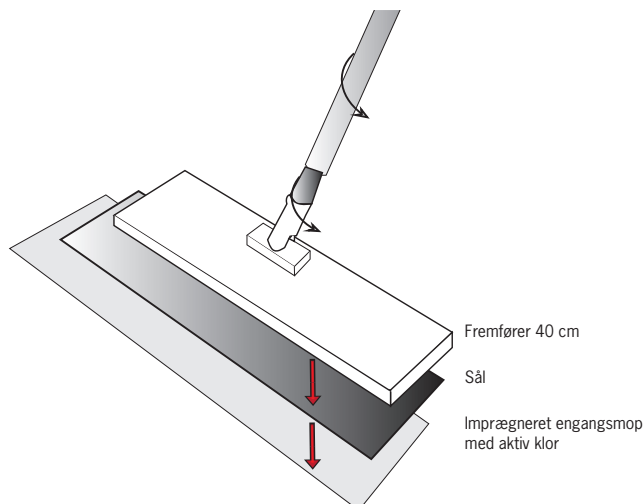

Wet Wipe A/S
Tel: +45 70 266 244
info@wetwipe.eu
www.wetwipe.eu

Wet Wipe GmbH
Tel: +49800 6646940
info@wetwipe.de
www.wetwipe.de

74-070 DA, Ver2
Oct 2017

wetwipe®