



# WipeClean Ethanol Disinfection 80%

## Desinfektionsklud



Engangsklude til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

### Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Udviklet til brug i sundheds- og plejesektoren, men kan også anvendes i fødevaresektoren.

Velegnet til brug på hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen, klinikker, tandlæger, dyrlæger, restauranter, køkkener, kontormiljøer samt i biler og andre transportmidler.

Bør ikke anvendes på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer.

Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

TIL PROFESSIONEL BRUG

### Produktegenskaber

Engangsklude til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 80% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret. Godkendt til brug i fødevarevirksomheder uden efterskyl med vand.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er både kryds- og z-foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, foldet og klar til brug.

WipeClean Ethanol Disinfection 80% findes i følgende størrelser:

5252 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m<sup>2</sup>

5211 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m<sup>2</sup>

5212 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m<sup>2</sup>

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt bl.a. mod Coronavirus og M. norovirus.

CE mærket. Vurderet af CEI til Intermediate level.

Godkendt til fødevarevirksomheder J.nr: 2015-29-7105-00105.

**Brugsanvisning**

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Tag en klud ud af pakken, bearbejd overfladen så den holdes fugtig i henhold til kontakttid for optimal effekt, smid ud. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Luk altid emballagen efter brug. Ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN374.

| Test standard | Claim                               | Test organism                                     | Contact time |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| EN16615       | Bactericidal activity               | P. aeruginosa<br>S. aureus<br>E. hirae            | 1 min        |
| EN13727       | Bactericidal activity               | P. aeruginosa<br>S. aureus<br>E. hirae            | 1 min        |
| EN13697       | Bactericidal activity               | P. aeruginosa<br>S. aureus<br>E. coli<br>E. hirae | 1 min        |
| EN13697       | Fungicidal activity                 | A. brasiliensis<br>C. albicans                    | 2 min        |
| EN13624       | Fungicidal activity                 | A. brasiliensis<br>C. albicans                    | 2 min        |
| EN13624       | Yeasticidal activity                | C. albicans                                       | 1 min        |
| EN16615       | Yeasticidal activity                | C. albicans                                       | 1 min        |
| EN14348       | Mycobactericidal activity           | M. terrae<br>M. avium                             | 1 min        |
| EN14476       | Limited spectrum virucidal activity | Adenovirus<br>M. norovirus                        | 1 min        |

**Indhold**

| Ingrediens          | Effekt          |
|---------------------|-----------------|
| Denatureret ethanol | 80% Aktivt stof |

**Opbevaring**

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.  
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 6 måneder fra åbning.

**Udseende og duft**

Uden farve og parfume.

**Anvendelses- og miljø sikkerhed**

MDR medicinsk udstyr og biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk).

Brugte klude bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

**Emballagematerialer**

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

| Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer | Varenummer | GTIN | GTIN (salgsenhed) | Forpakning |
|----------------------------------------------|------------|------|-------------------|------------|
|----------------------------------------------|------------|------|-------------------|------------|

|             |      |               |               |       |
|-------------|------|---------------|---------------|-------|
| 12 x 20 stk | 5212 | 5701684521229 | 5701684521212 | Wipes |
|-------------|------|---------------|---------------|-------|

|             |      |               |               |       |
|-------------|------|---------------|---------------|-------|
| 20 x 25 stk | 5211 | 5701684521120 | 5701684521113 | Wipes |
|-------------|------|---------------|---------------|-------|

|              |      |               |               |       |
|--------------|------|---------------|---------------|-------|
| 12 x 100 stk | 5252 | 5701684525227 | 5701684525210 | Wipes |
|--------------|------|---------------|---------------|-------|



#### Standard tilbehør

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Mini | 4114 Vægholder til WipeClean Mini |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Small | 4112 Vægholder til WipeClean Small |
|------------------------------------------|------------------------------------|

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Large | 4113 Vægholder til WipeClean Large |
|------------------------------------------|------------------------------------|

#### Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).