



WipeClean Chlorine Disinfection

Desinfektionsklud



Engangsklude til nem og hurtig high level desinfektion af overflader, der tåler klor.

Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler klor. Udviklet til brug i områder med high level desinfektionskrav i sundheds- og plejesektoren.

Velegnet til brug på hospitaler, plejecentre og hjemmeplejen til desinfektion af f.eks. toiletstole, inventar og kontaktpunkter mm.

Anvendes på materialer der tåler klor. Bør ikke anvendes på stof, træ, naturgummi, malede overflader, papiroverflader og visse plastmaterialer.
Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Engangsklude til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder aktivt klor frigivet fra Natriumhypoklorit. Uparfumeret.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er både kryds- og z-foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, foldet og klar til brug.

WipeClean Chlorine Disinfection findes i følgende størrelser:

5241 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m²

5242 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m²

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal, virucidal (bl.a. mod Coronavirus) og sporicidal effekt.

CE mærket. Vurderet af CEI til High level desinfektion.

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Tag en klud ud af pakken, bearbejd overfladen så den holdes fugtig i henhold til kontakttid for optimal effekt, smid ud. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Luk altid emballagen efter brug. Ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	2 min
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	2 min
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis	15 min
EN13697 EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	2 min
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Virucidal activity	Poliovirus Adenovirus M. norovirus	1 min
EN17126	Sporicidal activity	B. subtilis B. cereus C. difficile	5 min 3 min

Indhold

Ingrediens	Effekt
Natriumhypochlorit-opløsning (mængde af aktiv chlorin)	>1,0 g/kg Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato, 30 dage fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

MDR medicinsk udstyr og biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Brugte klude bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)****Package type**

24 x 5 stk

5242

5701684524220

5701684524213

Wipes

20 x 10 stk

5241

5701684524121

5701684524114

Wipes

**Standard tilbehør**

WipeClean Chlorine Small: 4112 Væggholder til WipeClean Small

WipeClean Chlorine Large: 4113 Væggholder til WipeClean Large

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.