

Oxivir Plus Spray

Bredspekteret rengørings- og desinfektionsmiddel

Beskrivelse

Oxivir Plus Spray er et klar-til-brug flydende rengøringsmiddel til rengøring og desinfektion af alle overflader, der tåler vand, samt visse boligtekstiler.

Egenskaber

- Patenteret sur hydrogenperoxid baseret formulering (AHP)
- Effektiv overfor en række mikroorganismer inkl. bakterier, vira og svampe
- Effektiv rengøring
- Parfumefri

Fordele

- Rengør og desinficerer i én arbejdsgang (undtagen Norovirus*), hvilket sparer tid
- Testet iht. europæiske normer som bredspekteret desinfektion overfor bakterier, vira og svampe
- Fremragende rengøringsresultater, stribefri optørring, minimerer kalkaflejringer
- Kan anvendes til hårde overflader, der tåler vand samt visse tekstiloverflader
- God sikkerhedsprofil for brugeren
- Aktivstoffet nedbrydes til ilt og vand
- Baseret på patenteret accelereret hydrogenperoxid (AHP) teknologi
- Velegnet til alle typer anvendelsesområder f.eks. i høj-risikoområder i sundhedssektoren

Brugsanvisning

Dosering: Bruges ufortyndet.

En arbejdsgang ved bakterier, svampe og vira, undtagen Norovirus*


Rengøring og desinfektion:

1. Fjern alt løs snavs
2. Sprøjt på overfladen
3. Tør af med en ren klud forvædet med **Oxivir Plus Spray**
4. Sprøjt på igen og lad **Oxivir Plus Spray** virke den ønskede tid i forhold til anvendelsen. Tør derefter af.

Den ønskede tid i forhold til anvendelsen

Baktericidal:	5 min
Fungicidal:	15 minutter
Virucidal*:	5 minutter
Tuberculocidal:	30 minutter

CE
0088

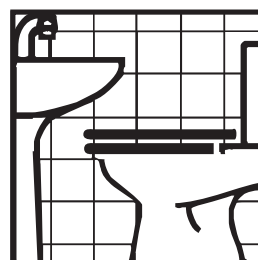

© A.I.S.E.

Oxivir Plus Spray

Bredspekteret rengørings- og desinfektionsmiddel

To arbejdsgange ved Norovirus:

Sprayrengøring og desinfektion:

1. Rengør overfladen.
2. Sprøjt **Oxivir Plus** fortyndingen på overfladen
3. Behandl overfladen med ren klud forvædet med **Oxivir Plus Spray** fortynding
4. Sprøjt på igen og lad Oxivir Plus fortyndingen virke i mindst 2 minutter.
Tør derefter af.

Vigtigt:

Bland ikke med andre produkter. Anvend ikke på vand- eller syrefølsomme overflader.

*Desinficerer Norovirus i 2 arbejdsgange.

Tekniske specifikationer

Udseende: klar farveløs væske

Vægtfylde [20°C]: 1.000

pH-værdi i brug: 1.8

Ovennævnte data er baserede på normal produktion, må ikke anvendes som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

For fuld information om håndtering og bortskaffelse af **Oxivir Plus Spray** henvises til sikkerhedsbladet. Opbevares tillukket i den originale flaske. Undgå ekstreme temperaturer. Reagerer med oxiderbare stoffer.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Ved anvendelse som anbefalet kan **Oxivir Plus Spray** anvendes på de fleste, oftest forekommende overflader.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer

Mikrobiologisk information:

Effektivitet testet i overensstemmelse med: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 og EN13727.

Emballagestørrelser

Varenummer	Forpakning	Type
100829234	6 x 0.75L	Spray i flaske m. skumdyse