

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Ethanol Disinfection 80%

Engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

Ethanol Disinfection 80% kludene er klar til brug direkte fra pakken, og er derfor den optimale løsning til desinfektion af områder, der tåler alkohol i f.eks. sundhedsplejen, fødevarersektoren samt tandlæge- og veterinærklinikker mm. Godkendt til fødevarer virksomheder (J.nr. 2015-29-7105-00105).

Kludene er pakket i lufttætte forpakninger med nem lukning. De er fremstillet af polyester og afgiver derfor så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80%

●●○ Intermediate-Level

Indholdsstoffer: Ethanol 700g/kg, Isopropanol 50g/kg. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 2 år. Efter åbning er kludene holdbare i 6 måneder

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5252	Mini - 100 wipes 20 x 20 cm	Til desinfektion af 0,5 m ²
5211	Small - 25 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m ²
5212	Large - 20 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

Biocidprodukt til professionelt brug.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne for anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Bearbejd overfladen, så den holdes fugtig i henhold til kontakttid angivet på forpakningen.

Produktet er ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader og visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker
- Daginstitutioner

plum

Ethanol Disinfection

Ethanol Disinfection 80% er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Murine norovirus.

Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Enterococcus hirae	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Escherichia coli	1 min	EN13697
VRE	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
MRSA	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN16615 EN13697 EN13727

Virus		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Coronavirus	1 min	EN14476

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Aspergillus brasiliensis	2 min	EN13697 EN13624
Candida albicans	1 min	EN16615 EN13624
	2 min	EN13697

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348



Produktet er CE-mærket.
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.